

CARE ⊕ Patientenschutzhandschuhe

- stark gepolstert
- reduziert die Greiffähigkeit
- erschwert das Ziehen von Sonden, Kathetern und Infusionen



Trickverschluss
Verhindert das Öffnen durch einfaches Ziehen



Artikelnummer 4832


- Größe 1 (normale Hände)
- Größe 2 (große Hände)



Qualität von **suprima** – exklusiv für *Medicare* by Britta Gabriel GmbH

WWW.PFLEGEOVERALL24.DE

- **WARNHINWEIS:** Der Einsatz des Schutzhandschuhs ersetzt nicht die konsequente Überwachung des Patienten durch eine Pflegekraft. Die regelmäßige Kontrolle der Hände auf reduzierte Durchblutung ist notwendig. Verletzungen können nicht in jedem Fall verhindert werden – daher ist jegliche Haftung ausgeschlossen.

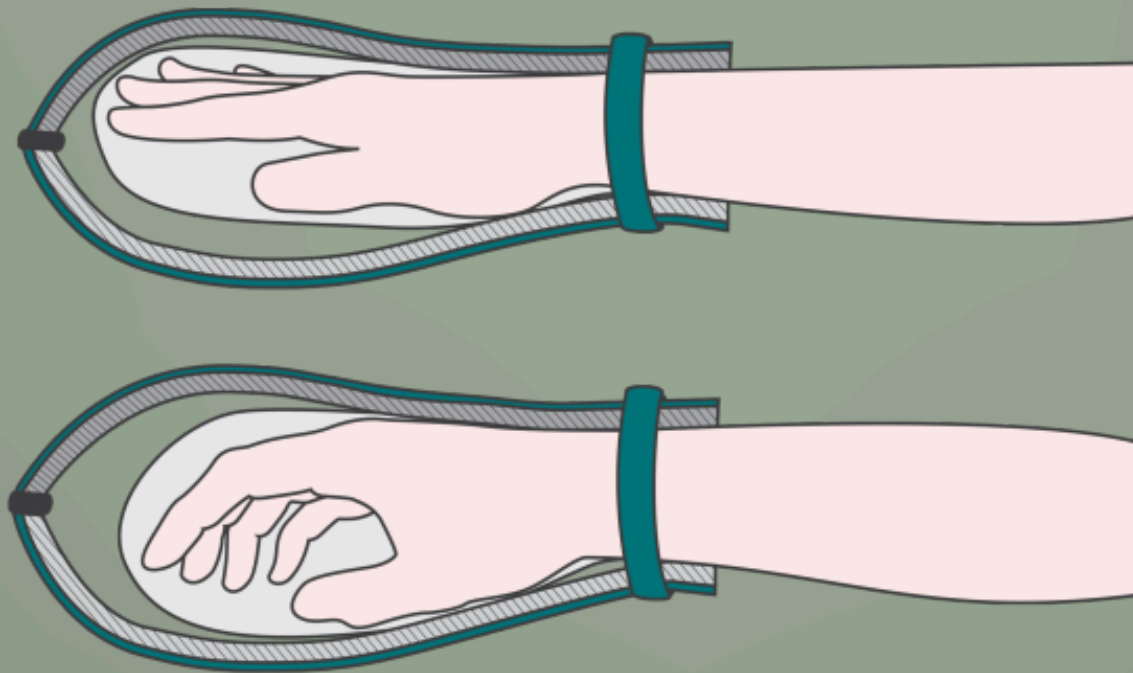

Dank der starken Polsterung und des robusten Materials wird die Greiffähigkeit erheblich reduziert, während die Beweglichkeit der Finger erhalten bleibt. Die weiche Innenausstattung sorgt für hohen Tragekomfort und leitet Feuchtigkeit optimal ab, um Schweißbildung zu minimieren.

Dieser Trickverschluss wurde entwickelt, um das unbeabsichtigte Abziehen der Handschuhe zu verhindern und so für zusätzliche Sicherheit zu sorgen. Der Verschlussmechanismus lässt sich nur dann öffnen, wenn der **schwarze Innenbereich** auf der Außenseite des Druckknopfes zuerst gedrückt wird. Durch das Betätigen des Knopfes wird ein spezieller Mechanismus aktiviert, der den Druckkopf entriegelt und nur dann die Möglichkeit gibt, den Verschluss zu öffnen. Dieser zusätzliche Schritt sorgt dafür, dass der Handschuh fest sitzt und nicht versehentlich geöffnet wird.



Öffnen des Trickverschlusses:

1. schwarzen Innenring des Druckknopfes eindrücken
2. Trickmechanismus öffnet sich
3. Druckknopf kann geöffnet werden

Bitte die Handgelenkgurte vor der Wäsche entfernen, oder verschließen